

FICHA TÉCNICA



INFORMACION GENERAL

- REF: FRO871
- Nombre del dispositivo: Fast Rad
- Marca: Niad Med
- Tipo de dispositivo: Almohadilla para posicionamiento de brazo
- Material: Poliuretano flexible, suave al tacto, libre de latex

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Dimensiones:	8 cm de ancho por 48 cm de largo.
Peso:	Ligero y portátil
Esterilidad:	El dispositivo no es estéril. Si se desea, se puede envolver en un campo estéril de la forma más conveniente.

DESCRIPCION Y USO

El FAST RAD es una almohadilla ergonómica fabricada de poliuretano flexible diseñada para proporcionar un soporte cómodo para el brazo del paciente y facilitar el acceso radial para el médico. El dispositivo permite posicionar el antebrazo con la palma de la mano hacia arriba, logrando una hiperextensión de la muñeca. Esta posición facilita el acceso del médico al pulso radial para procedimientos como la punción radial y la venopunción.

ADVERTENCIAS Y REUTILIZACION

NO ES REUTILIZABLE. El FAST RAD es un dispositivo de un solo uso en un solo paciente. No debe ser reutilizado ni procesado, ya que esta acción puede poner en peligro la integridad del dispositivo y causar su fallo. La reutilización puede crear riesgo de contaminación del dispositivo, lo que conlleva riesgos de contaminación cruzada para el paciente.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Coloque el dispositivo FAST RAD en una superficie estable para el acceso en extremidades superiores.
2. Coloque el antebrazo del paciente con la palma de la mano hacia arriba sobre el dispositivo FAST RAD.
3. Es recomendable unir los dedos del paciente con una cinta al FAST RAD para fijar la mano y lograr una correcta hiperextensión de la muñeca.
4. Una vez hecho esto, se puede continuar con el proceso de preparación del paciente y el procedimiento médico.

Diario Oficial. 31 de Diciembre 2011
Secretaría de Salud

Este producto por su naturaleza, características propias y uso no se considera como insumo para la salud y por ende no requiere registro sanitario

P 48,1475